

视频诊断系统

使用说明书

1. 安装启动

- (1) 运行 VDSsetup 直至完成
- (2) 运行 VDS.EXE

显示如下：



2. 增删资料

1. 增加资料

新患者不用输入编号

在指定位置输入患者姓名（必填项）、年龄、性别、电话、住址等信息。

“编号”为全数字，自动生成。输入已有信息时，系统自动弹出相应资料。

输入报告名称、申请医师（如空白，报告上将不出现该项）、诊断医师。

2. 删除资料

点击编号右侧的“-”

编号




则当前客户资料整体删除。

3. 观察与拍照


在预览框单击鼠标左键，画面定格

在预览框双击鼠标左键，画面依序存入左侧小框，如不满意某图，可右击删除，或单击选中小框，再双击预览框内容替换。

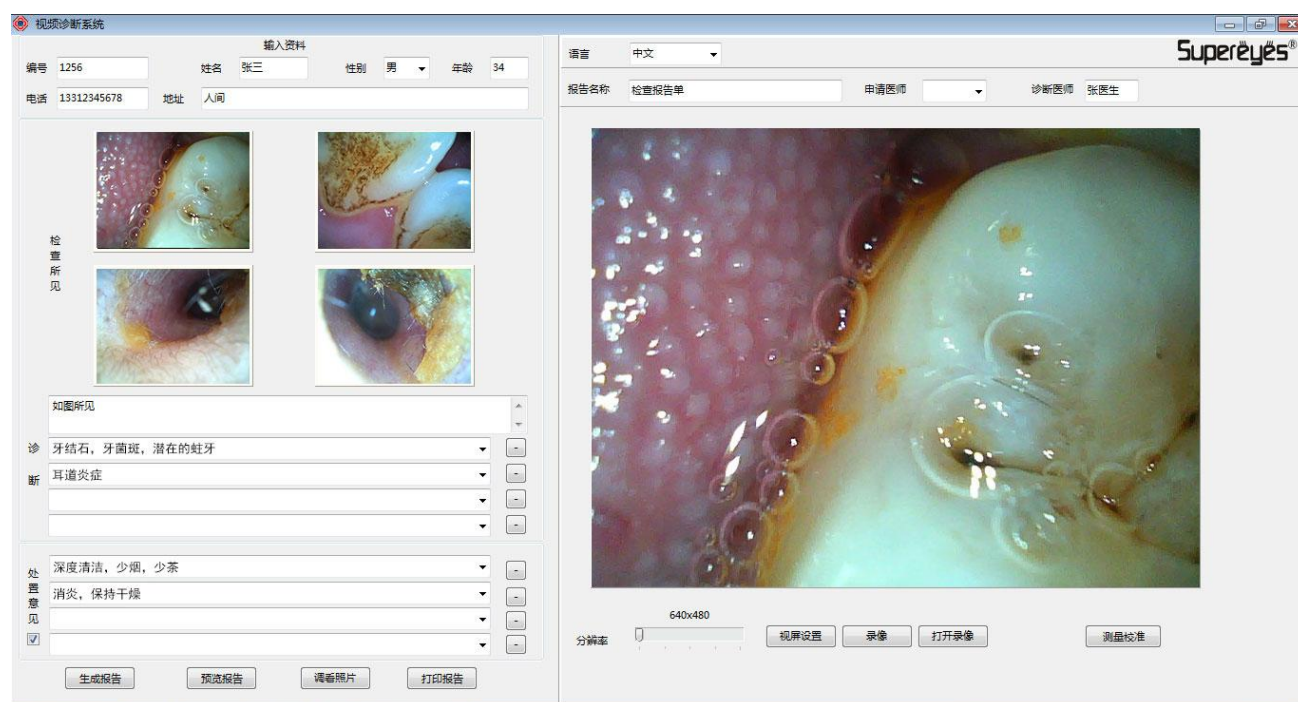

4. 视频设置

(1) 改变分辨率（30 万以上像素设备有效）

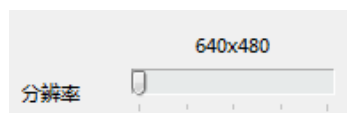

当分辨率大于 30 万像素时，可通过平移刻度条改变分辨率即放大倍数


(2) 改变亮度、对比度等

点击 **视屏设置** 弹出：



可调节相应指标。通常默认值效果较好

(3) 测量校准

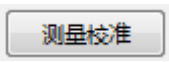将标准尺放至清晰位置，点击 ，再移动鼠标到预览框，则鼠标显示小十字。点击鼠标左键并移动到合适长度后松开，弹出：




输入值确定，校准完成。

此后，不调节焦距就勿需重新校准

5. 图片处理

双击小图，则图片显示到预览框，可以对其去色彩、旋转、测量操作，双击存入原位置，或点击返回取消前操作。

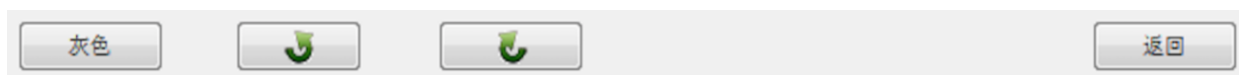

右击小图，选择删除可以删除当前图片。


6. 病历导语

在空白部分输入相应内容。



7. 诊断选项

输入医生诊断意见，生成报告时保存。下次点右角三角形则显示以供选择，如果不需要，点右边“-”删除。

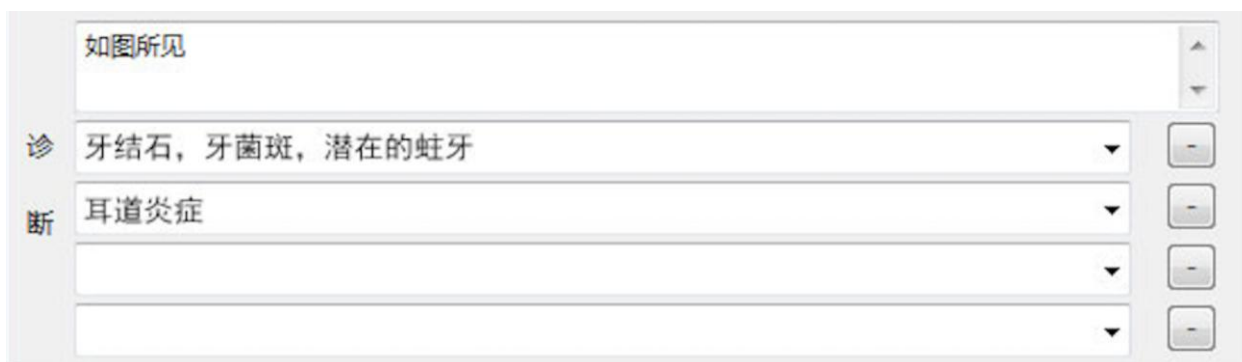

8. 处置意见

输入医生诊断意见，生成报告时保存。下次点右角三角形则显示以供选择，如果不需要，点右边“-”删除。

报告上勿需医生处理意见时不勾选处理意见下方方框即可。




9. 生成报告

点击生成报告，内容保存。

10. 预览报告

点击预览报告，另页显示当前报告。可以前翻、后翻、打印等操作。

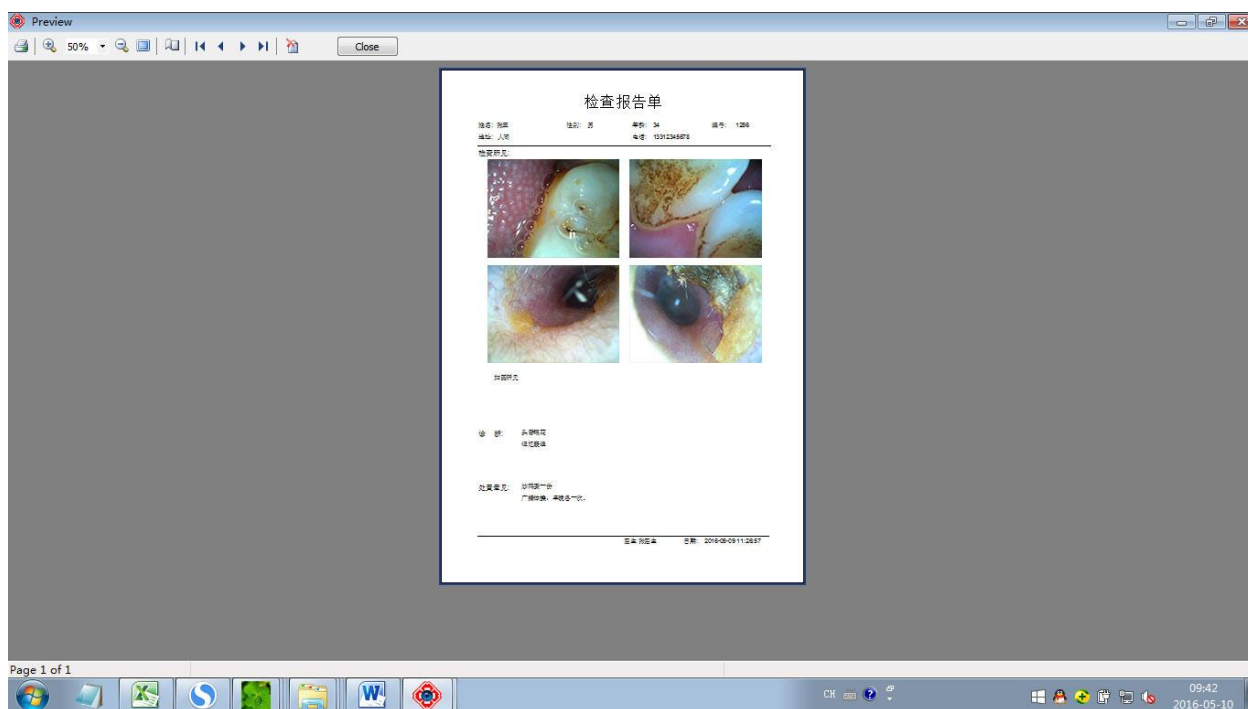


11. 打印报告

直接打印当前报告。执行相应打印动作。


12. 调看照片

点击调看照片进入当前照片目录。

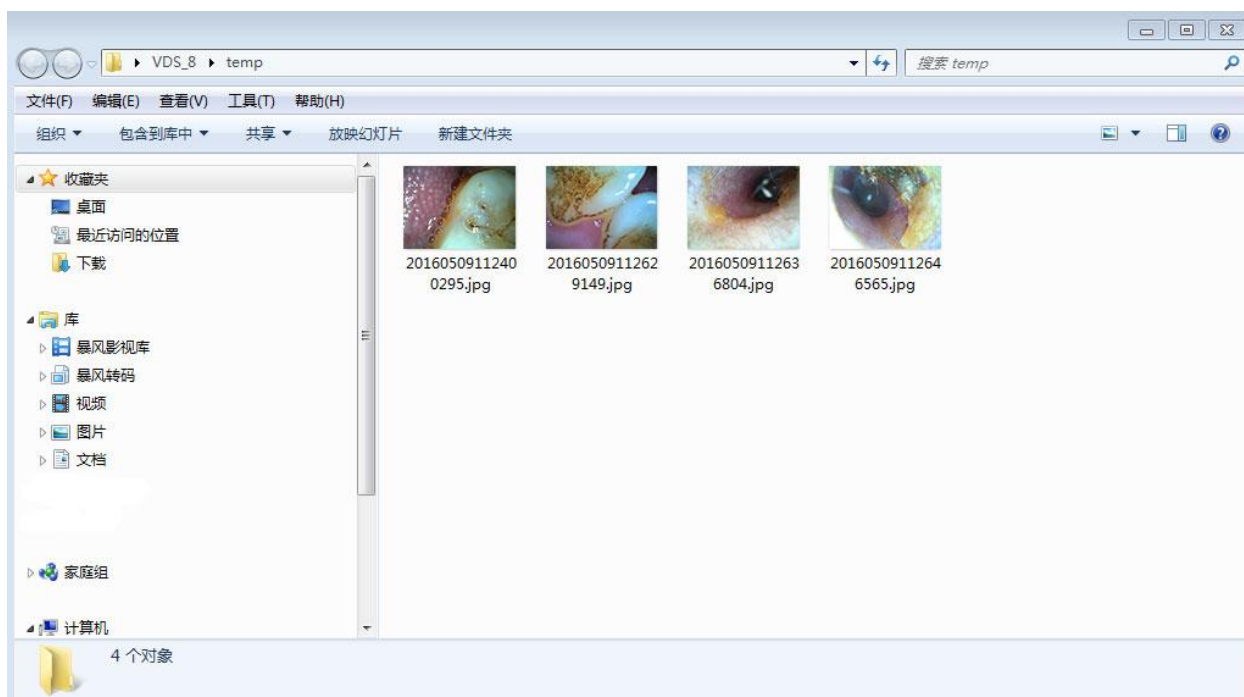

13. 录像

点击录像键开始或终止录像，点击打开录像键进入当前录像目录。

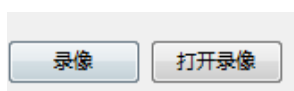

14. 帮助与服务

点击窗口右上角  链接至网站服务。